

光碟使用說明



此光碟適用於 Windows < 不適用於 Apple 電腦 >

步驟一


- **AGFA** X 光閱讀軟件已預先安裝在光碟上
- 把光碟放到使用者的電腦，**AGFA** 將會自動啟動，隨後進入步驟二

如果沒有啟動，請跟隨以下方法：

方法一：如見到自動播放視窗，於印有 **AGFA** 標誌的執行 viewer → 雙擊滑鼠左鍵

方法二：如沒見到有視窗出現，可於桌面上的“我的電腦 **AGFA** “ 雙擊滑鼠左鍵 或
尋找 **AGFA** 標誌的 viewer → 雙擊滑鼠左鍵

請耐心等待影像顯示

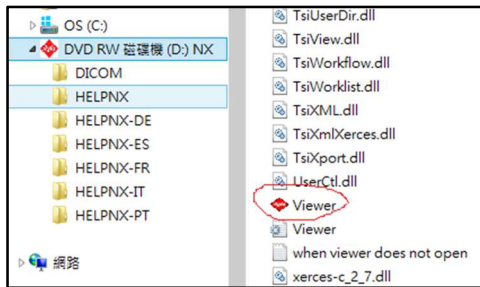

步驟二

1. 如有多於一張，請於左上角名字隔離 田 標誌左擊一下
2. 原本 田 已顯示 田
 CR1 所照位置
 CR2 所照位置 (
3. 於需要看所照位置雙擊滑鼠左鍵
4. 請耐心等待影像顯示第二張

